



Migraine Prevention
Non-pharmaceutical
Easy to Use

Help more migraine patients

La neuromodulazione con Ozilia® Kinetic Oscillation Stimulation rappresenta uno strumento efficace, sicuro e facile da utilizzare per trattare i pazienti affetti da emicrania cronica, offrendo un'alternativa profilattica ai farmaci.



CHORDATE
MEDICAL

La tecnologia Ozilia® per l'emicrania cronica

CHORDATE
MEDICAL

Chordate System S220 è composto da un controller, dal catetere monouso e dalla fascia per la testa. Il dispositivo stimola la mucosa nasale del paziente mediante oscillazioni cinetiche a bassa frequenza.

La durata del trattamento è di 10 minuti in ciascuna cavità nasale (per un totale di 20 minuti per sessione) con frequenza della vibrazione di 85 Hz e pressione del palloncino di 80 mbar.

- › Trattamento profilattico
- › Trattamenti di follow-up illimitati
- › Procedura non chirurgica
- › Procedura semplice da eseguire
- › Nessun effetto collaterale inatteso
- › Nessun farmaco somministrato

Destinazione d'uso:

Chordate System S220 è destinato al trattamento preventivo di pazienti adulti (minimo 18 anni) con diagnosi di *emicrania cronica*.

Il controller crea oscillazioni cinetiche mediate dall'aria con pressione e frequenza regolate durante un tempo di trattamento preimpostato. Il catetere viene inserito nella cavità nasale del paziente e trasmette le oscillazioni cinetiche alle mucose.

Il catetere è progettato per essere utilizzato su un solo paziente in un'unica occasione di trattamento.

La fascia per la testa, destinata all'uso da parte di più pazienti, garantisce un alloggiamento stabile del catetere durante il trattamento.

Per ridurre il rischio di contaminazione tra i pazienti, è necessario l'utilizzo di cuffiette monouso.

Chordate System S220 è destinato all'uso da parte di operatori sanitari qualificati in ambiente clinico e su prescrizione di un medico autorizzato.

Classificazione e stato normativo:

Il controller e il catetere sono classificati come dispositivi di classe IIa secondo la regola 9 dell'Allegato IX MDD.

La fascia per la testa è classificata come dispositivo di classe I secondo la regola 1 dell'Allegato VIII MDR.

Il sistema Chordate S220 è provvisto di Certificato CE n.41316889-05 ed è contrassegnato dal marchio CE.

Starter kit Ozilia® Sistema per Emicrania S220

Codice prodotto: 1003092

Contenuto:	Controller per emicrania Mark III	1
	N. trattamenti	5
	N. cateteri	5
	Fascia per la testa	1
	Istruzioni per l'uso	1
	Alimentatore	1



Kit cateteri per il trattamento Ozilia®

Codice prodotto : 1001245

Contenuto:	N. trattamenti	25
	N. cateteri	25



CHORDATE
MEDICAL

Distributore esclusivo per l'Italia
 VEDISE Hospital
Improving Life
www.vedise.it